

Snabbguide för CallFob


9261-8277 (Issue 2.0)



Call Fob – Snabbguide

Knapparnas funktioner

Sänder signal om assistans (larm). Ett eller två tryck - programmeras av behörig administratör.

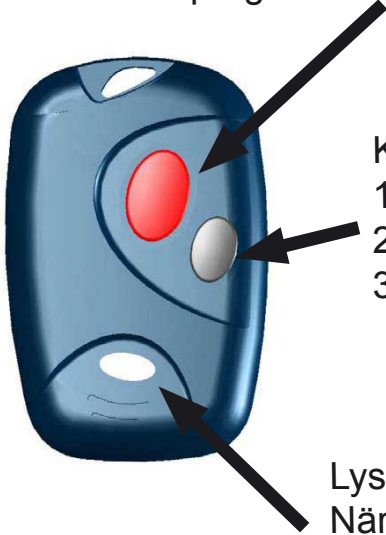

Knappfunktion :

- 1) Kvittera bort signal om assistans (kort tryck)
- 2) Koppla PÅ/AV (lång intryckning)
- 3) Kontrollera närvaro i nätverk (kort tryck)

Lysdiod: en blink = ej i nätverket

två blink = kontakt med nätverket

Lysdiod - normalt SLÄCKT

När knappen för assistans (larm) har tryckts in:

Långsam blink - larm har sänts iväg

2 snabba blink - larm har tagits emot

3 snabba blink - larmet har kvitterats

Pipljud och vibrator

Funktionen för pipljuden och vibratorn bestäms av behörig administratör.

Larmknappens pipljud och vibrator (om använd) är till för att indikera en förändring i status vid påkallad hjälp och ljuder parallellt med lysdiodens blink i larmknappen.

Övriga PIPLJUD:

Återkommande dubbla pip - låg batterispänning

Tredubbla pip - utanför räckvidden för nätverket, d.v.s. ingen kontakt.

Anslutning till ett nätverk

Om larmknappen varit borta från nätverket, tryck då in den svarta knappen när knappen åter befinner sig inom nätverkets räckvidd för att åter koppla upp knappen mot nätverket, t.ex. när du anländer till arbetet efter att ha varit hemma.

Call Fob – Snabbguide

Funktionen ”Man Down” (liggande person) även kallat ”Tilt larm”

Denna funktion programmeras att användas av administratör

I fall Call Fob blir liggande (lutar mer än 60°) kommer den att börja pipa, vibrera och LED lampan börjar blinka. Detta betyder att Call Foben måste bli satt i rätt position igen. Om detta inte sker kommer Call Foben skicka ett automatiskt larm.

För att återställa efter ett larm tryck in den svarta knappen.



För att förhindra att det automatiska larmet för liggande bärare ska aktiveras, se till så att enheten alltid befinner sig i upprätt läge. Den bärs bäst i det bälteshölster som finns som tillbehör.

Funktionen ”Död man” (medvetslös eller sovande person)

Denna funktion programmeras att användas av administratör.

Med gämna mellanrum kommer du som användare att få en förfrågan (signal)



Tryck på knappen för att besvara signalen (ljudande pip) för kontroll av att bäraren är vid fullt medvetande. Om signalen inte besvaras aktiveras automatiskt ett larm.

Call Fob – Snabbguide

Batteribyte



Skjut luckan så att de två upphöjda markeringarna hamnar mitt för varandra, för att sedan lyfta bort luckan.

Laddningsbara batterier av typ AAA Ni-Mh eller vanliga alkalibatterier kan användas i en Call Fob.

Standarder


Denna produkt uppfyller kraven i enlighet med EU:s direktiv för radio- och telekommunikationsutrustning (EU Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive 99/5/EC).

Enheten uppfyller krav enligt Del 15 av kanadensisk industristandard (**FCC Rules & Industry Canada Standard RSS 210, Part 15**).

Detta gäller under två förutsättningar:

- 1) Denna enhet får inte skapa skadliga störningar.
- 2) Enheten måste tåla störningar som kan orsaka felfunktioner.

Icke auktoriserade ändringar av denna utrustning kan medföra förbud för användarens rätt att utnyttja utrustningen där de kanadensiska reglerna gäller.

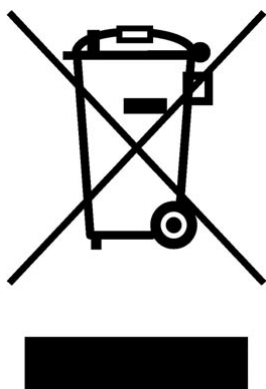

WEEE-direktivet och avfallshantering

När denna enhet tjänat ut får den INTE hanteras som vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas till lämpligt inlämningsställe för elektrisk och/eller elektronikutrustning för återvinning, eller sändas tillbaka till leverantören så den kan tas omhand på rätt sätt.