

Sänglarmet Elvira

Går jag ur sängen nu -så larmar det!



Sänglarmet Elvira

Elvira en intelligent lösning för säng & stollarm som löser många olika typer problem när det gäller vård av människor som har problem med balansen och där olycksrisken är överhängande.

Elvira är anpassat till de flesta larmsystem som finns på sjukhus eller inom äldreården. Elvira kan också arbeta helt fristående från andra larmsystem.

Elvira är helt trådlöst och drivs med batteri

Elvira ger en tryggare omvårdnad då personalen omedelbart kan se om en patient eller vårdtagare lämnar sin säng eller stol. Eller inte återvänt inom en viss tid

Elvira består av 3 delar

- 1 Centralenhet. Magic Stick sensorn ansluter du till centralenheten. Centralenheten är mycket enkel att fästa på sängen eller en stol via den inbyggda bygeln.
- 1 Magic Stick är en oöm sensor som placeras under madrass eller sittdyna.
- 1 larmmottagare här finns olika lösningar beroende på ert behov.

Centralenhet

Centralenheten har ett antal grundfunktioner som:

- Till & fränkoppling av själva centralenheten
- Timer, - 2sek, 10 min, 20 min, 60 min
- Testfunktion för test av Magic Stick
- Larmsignal, lokalt med ljudvolym



Magic Stick

Den 400 eller 1000 mm långa Sensorn är den enda "slimline" givaren på marknaden som garanterar full täckning av sängen.

Magic Stick är utformad för att vara en flexibel, robust och mycket hållbar sensor för att användas antingen till en säng eller en stol.

Sensorn är vattentät enligt IP67 standard. Den kan också rengöras för hand med vatten och rengöringsmedel.



Larmöverföring

Det finns 3 olika sätt att överföra larminformation till Personlen,

1. Till befintligt larmsystem via kabel
2. Via vårt lokala personsökarsystem DP som har en radiotäckning för en normal avdelning. där larminformationen visas i klar text på en liten personsökare
3. Via vårt lokala personsökarsystem Piccolo som har en radiotäckning som täcker 4-8 avdelningar, eller en fastighet.

Produkter

Elvira består av ett antal produkter Enligt följande:

34-122110 Centralenhet Elvira

34-122220 Magic Stick 400 normalt till Stol eller Säng eller 34-122210 Magic Stick 1000 till säng

Du behöver bestämma hur du vill skicka larmet vidare.

Via kabel till befintligt larmsystem

34-122310 Anslutningskabel Telepropp

Via Direkt Page system

34-30151 RadioHub Direct page 429

39-123115 Personsökare DP



Via Piccolo personsökarsystem

34-10120 Radiohub Piccolo

94-2433 Nätadapter 12 0.9 A

39-133115 Personsökare Birdy

39-133210 Bordsladdare

Godkännanden

CE märkt. Uppfyller tillämpliga standarder