

Intercall Demensia

- Enkelt och pålitligt larmsystem för demensboenden
- Få kontroll på er demensavdelning dygnets alla timmar
- Hjälper och underlättar för de boende



InterCall Demensia


Så här fungerar Demensia



Demensia indikerar att den boende lämnar sängen



Lampa på toaletten tänds automatiskt med dimmerfunktion

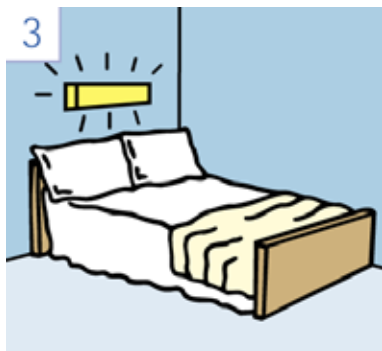

Lampa vid sängen tänds med dimmerfunktion



När den boende kommit tillbaka till sängen släcks lampan på toaletten samt vid sängen automatiskt med fördröjd funktion

Inter Call Demensia är speciellt framtaget system för demensvården. Funktionerna är speciellt framtagna efter önskemål från personal som jobbar inom äldreomsorgen med specialisering på demensvården


Demensia är helt integrerbart till Inter Call 600 som är Englands mest sålda patientsignalsystem.

Även om Demensia används mest under natten, ger systemet 24 timmars kontroll av boenden. Din personal kan vara aktiva just där behoven finns.

Genom att styra belysningen i sovrummet och den egna toaletten, hjälper Demensia och vägleder den boende att hitta till toaletten och tillbaka till sängen på natten utan behov av personal som övervakar.

Om det vid någon tidpunkt är så att rörelsermönstret inte överensstämmer med den profil som är förvald sker ett automatiskt larm som varnar din personal.

Demensia kontrollerar sovrum, altandörrar och fönster och varnar personalen omedelbart om den boende lämnar sitt rum.

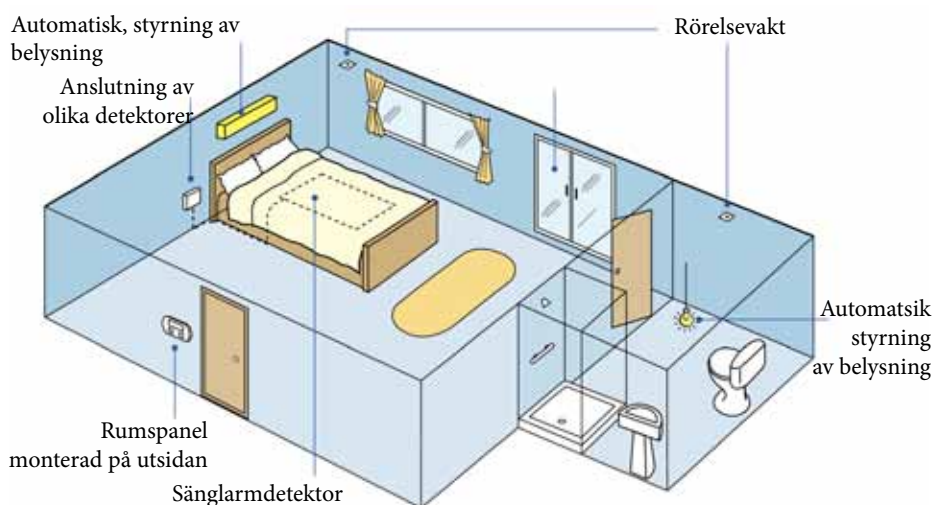

Rumspanel sitter normalt monterad utanför varje lägenhet. Panelen visar rörelse eller öppna dörrar & fönster. LCD-skärmen gör det enkelt att välja önskad rörelseprofil för varje boende och visar orsaken till eventuella larm från de boende.



Rörelsedetektor - de takmonterade PIR-enheter övervakar rörelse i rummet och badrummet och skicka all data tillbaka till enheten för analys eller för att eventuellt utlösa ett larm